


"Dri-fi" Skvalpstopparen – för glas och mugg

Istället för pipmugg, sugrör eller specialanpassade glas

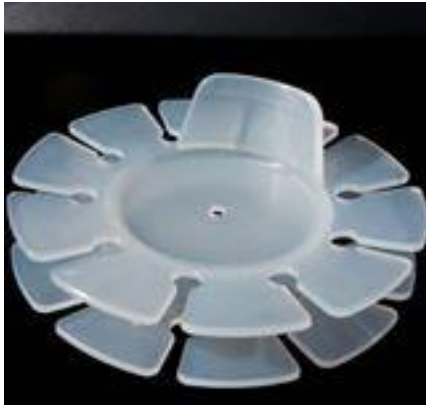

Dri-Fi är en svensk uppfinning som är unikt framtagen. Man placerar den i ett vanligt dricksglas eller mugg och den förhindrar att man spiller om man är ostadig eller handen skakar eller man är sängliggande. Den passar även bra för barn som ska lära sig att dricka ur vanliga glas och muggar. Användaren kan därmed i många fall inte behöva använda sugrör, pipmuggar, eller specialmuggar utan kan använda samma glas/muggar som övriga vid måltiden.

Den anpassar sig till dryckeskärlet tack vare sina speciella mjuka vingar av nyckelhåls konstruktionen och passar glas/muggar som är 55-75 cm i diameter. Man kan dricka alla sorters drycker, såväl varma som kalla, kaffe, te, nyponsoppa, yoghurt dvs alla drycker som inte har fruktbiter el dyl. Överbliven dryck rinner tillbaka genom ett centralt hål.

Dri-fi tillverkas av livsmedelsgodkänd silikon. Den kan maskindiskas. Art nr 160001

Användarinformation:

- Innan du använder den ska den diskas i diskmaskin eller för hand med varmt vatten och diskmedel
- Dri-fi är endast avsett för användning i dryckeskärl och får inte användas till något annat exv. som leksak.
- Kolla regelbundet din Dri-fi så att inga skador uppstått. En skadad eller modifierad Dri-fi ska kasseras.
- När den ska sättas in i ett glas ta tag i greppet med tummen och pekfingeret och låt de andra fingrarna vila mot motsatt sida. Placera den i dryckeskärlet med en mild rörelse tills du känner att den greppar tag mot kanterna på innersidan. Din Dri-fi ska sitta vågrätt i glaset.



En Dri-fi kan användas till flera olika modeller av glas/muggar



Med Dri-fi kan man använda samma sorts glas som de andra matgästerna.

Pris 160 kr + moms = 200 kr fraktfritt

Beställ den via e-butiken från hemsidan www.svedinrehab.se

Eller med e-post: elisabeth@svedinrehab.se . Eller via sms till 0709 69 52 69

Skriv alltid både leverans och faktura adress

Elisabeth Svedin Rehab

Borgargatan 18
117 34 Stockholm

Telefon
0709-69 52 69

elisabeth@svedinrehab.se
www.svedinrehab.se

Plusgiro
185431-4

F-skatt
510715322201